




Sprøjteoptrækker

Sprøjteoptrækkeren er et ergonomisk redskab som sikrer at hænder og fingre aflastes under medicinoptræk ved at lade bruger de større muskelgrupper til bevægelsen.


Sådan bruges sprøjteoptrækkeren

Denne korte guide, viser hvordan sprøjteoptrækkeren bruges til at sikre et mere ergonomisk optræk.


Med sprøjteoptrækkeren bruges de større muskelgrupper i armene og aflaster derved hånd- og fingermuskler hos den sundhedsprofessionelle

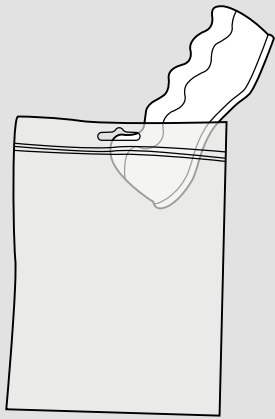


1. Pak sprøjteoptrækkeren ud af emballagen.

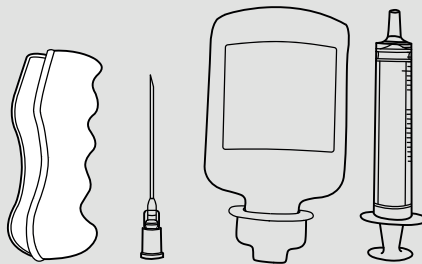


2. Læg de nødvendige remedier frem, som kanyle, sprøjte, samt præparat.

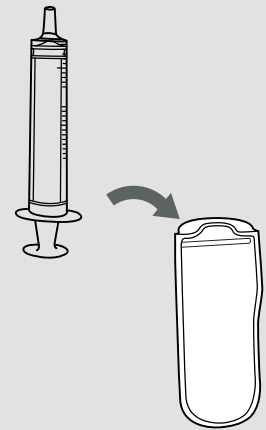

3. Sprøjten placeres i sprøjteoptrækkeren.

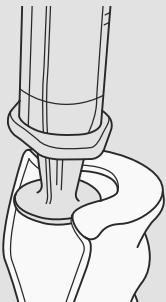

4. Sprøjtestemplet placeres så langt inde som muligt. I sprøjteoptrækkeren kan der bruges sprøjter fra 20-60ml.

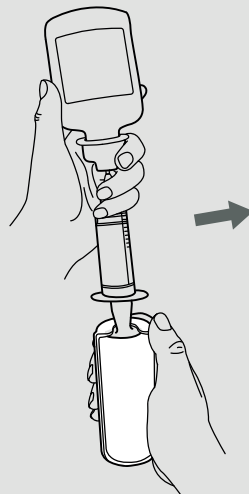

5. Når optrækkeren bruges, holdes bevægelsen så tæt på kroppen som muligt for at sikre at ergonomisk træk

Herefter følges den vanlige behandling.