



IV Dropkrog

IV Dropkrogen er en brugervenlig løsning til IV behandling i eget hjem. Dropkrogen er udviklet som et alternativ til at skulle udlåne dropstativer fra sygehuset, og kan med sit simple design hænges op i eget hjem, på en dør, skabslåge eller et søm.

Dropkrogen kan både bære infusionsflasker og infusionsposer helt op til 3 liter.


Mere info og kontakt på:
simplifiedmedtechsolutions.com

 **Simplified**
Medtech Solutions


Sådan bruges IV-Dropkrogen

Denne korte guide, viser hvordan dropkrogen hænges op i eget hjem.


IV-Behandlingen skal udføres efter den sundhedsprofessionelles instruktioner.

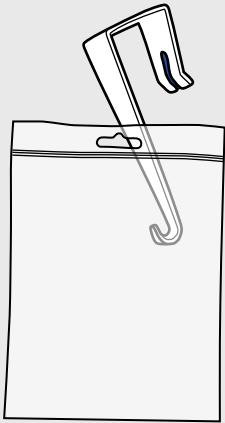


1. Pak IV-Dropkrogen ud af emballagen

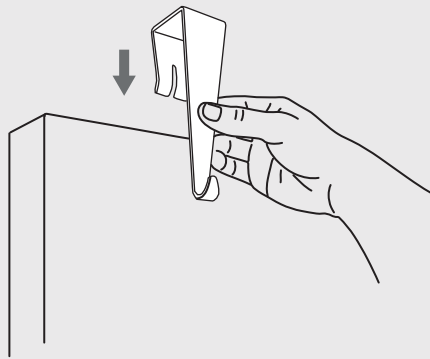


2. Hæng IV-Dropkrogen op på dør eller skabslåge. Underkanten af infusionsposen placeres mindst 60 cm over hjertehøjde på den siddende patient.

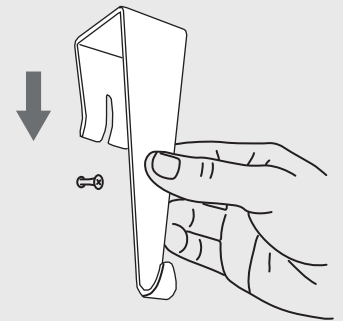


2b. IV-Dropkrogen kan alternativt også hænges op på en skrue/søm.

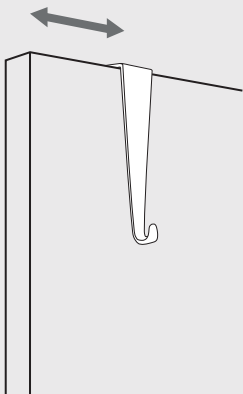

3. IV-Dropkrogen skal placeres med minimum 20 cm afstand fra dørens kant.

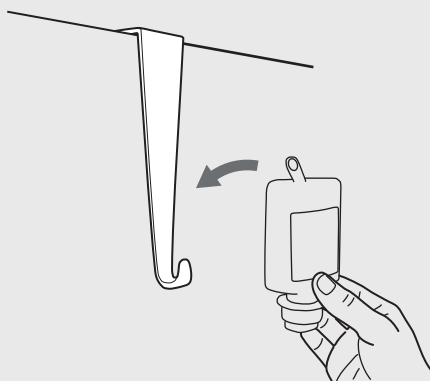

4. IV-Væsken hænges op. Krogen kan bære helt op til 3 kg

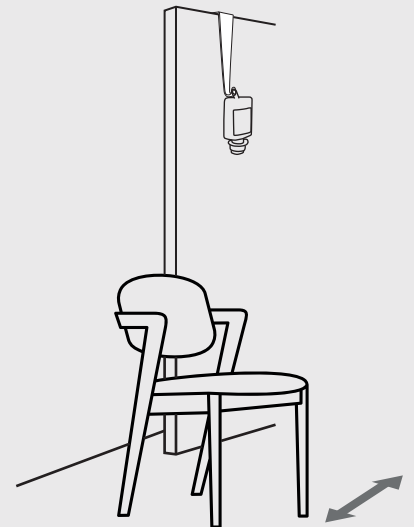

5. Placer en stol tæt på IV-Dropkrogen til at sidde på under behandlingen.

Herefter følges behandling, og senere bortskaffelse af udstyr som instrueret af den behandlingsansvarlige